


# Anleitung Probeentnahme: Penisabstrich

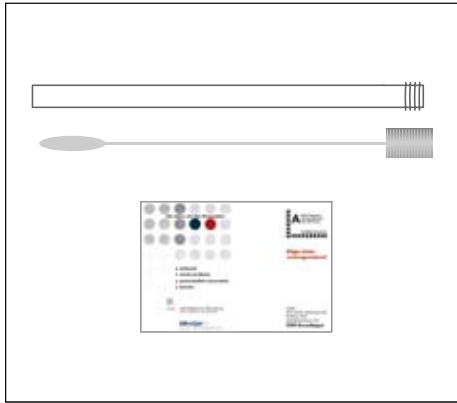

## 1. Inhalt kontrollieren


Den Inhalt der Sendung auf Vollständigkeit überprüfen (gemäss nebenstehender Illustration).

Bitte prüfen Sie, ob der Name auf dem beiliegenden Lieferschein mit dem Ihren übereinstimmt.



## 2. Vorbereitung

Wattestäbchen aus dem Plastikrohr herausziehen und in die rechte Hand nehmen.

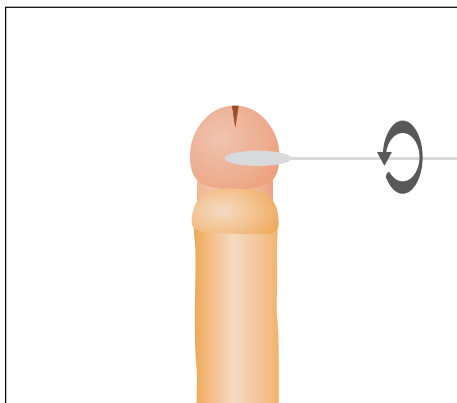

## 3. Abstrichentnahme

Mit der linken Hand die Vorhaut des Gliedes zurückziehen und mit Wattestäbchen über die Harnröhrenöffnung und Eichel reiben.

Den Wattetupfer – ohne zu berühren – wieder in das Plastikrohr zurückführen und den Stopfen gut zu drücken.



## 4. Versand

Das Plastikrohr mit der Probe **und dem beiliegenden Lieferschein** in den Versandbeutel stecken.

Den Beutel mit der selbstklebenden Lasche gut verschliessen.

In den nächsten Briefkasten werfen. Eine Frankierung ist nicht notwendig.